


#### CELOX Granular


### 1 - Coja un sobre de CELOX




## 2 - Rasgue por la marca

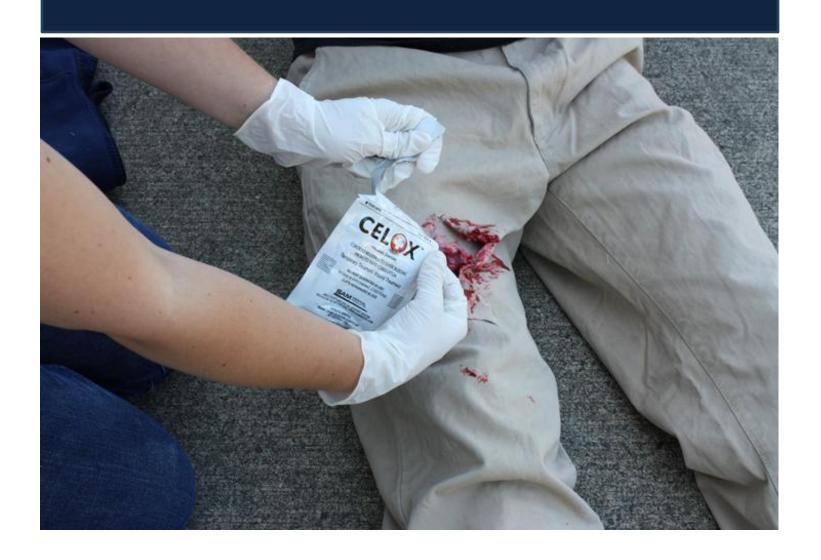

# 3 - Retire el exceso de sangre con una compresa

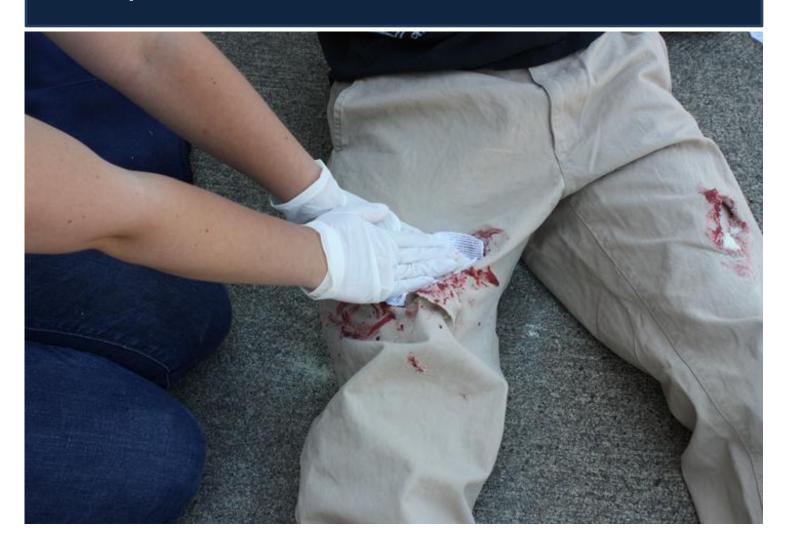


## 4 - Vierta todo el contenido del sobre de CELOX en el interior de la herida

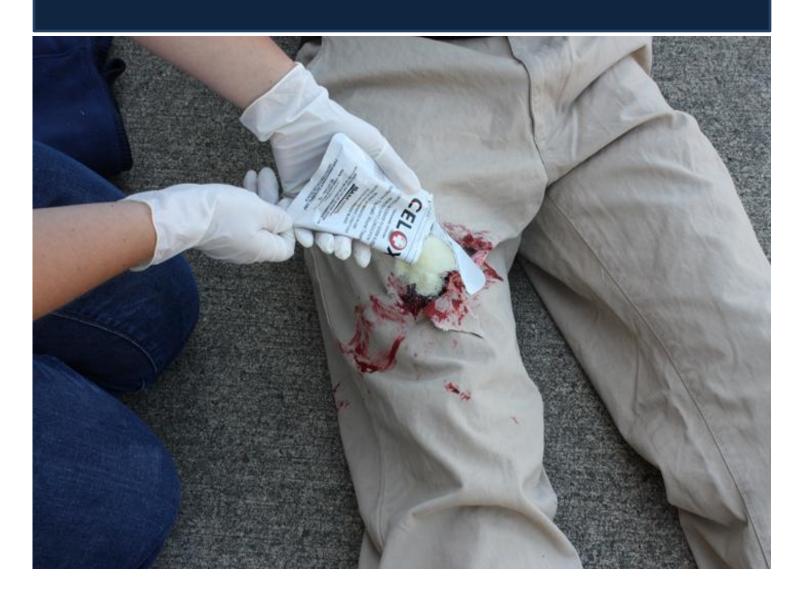

#### 5 - Coloque una gasa sobre la herida




## 6 - Presione con firmeza durante 5 minutos

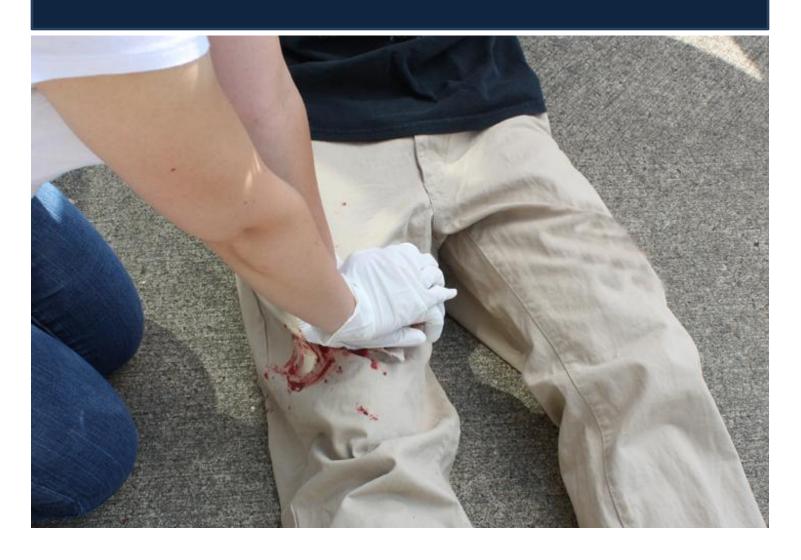

#### 7 - Si el sangrado persiste

Si la hemorragia continua, aplique 5 minutos más de presión.

# 8 -Fije con una venda para mantener la presión sobre la herida

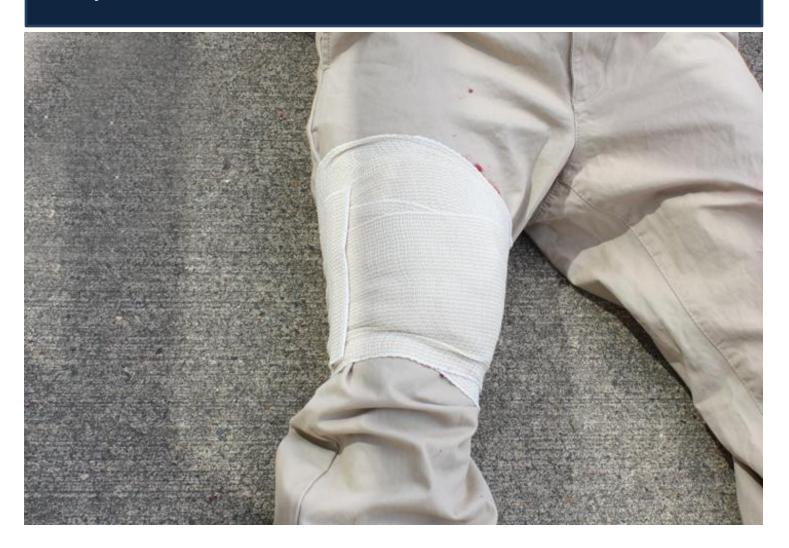

### 9 – Una vez controlada la hemorragia

Busque atención médica

Muestre el embalaje de CELOX al médico.

Deseche el producto que haya sobrado tras la aplicación.