

CELOX Modo de empleo

1 - coja un sobre de CELOX.



2 - Rasge por la marca.



3 - Retire el exceso de sangre con una compresa o gasa.



4 - Eche todo el contenido del sobre de CELOX en el interior de la herida.



5 - Coloque una gasa sobre la herida.



6 - Presione con firmeza durante 5 minutos.



7 - Si el sangrado persiste.

**Si la hemorragía continua, aplique
5 minutos más de presión.**

8 -Fije con una venda para mantener la presión sobre la herida



9 – Una vez controlada la hemorragia

Busque a tención médica

Enseñe el embalaje del CELOX al médico.

**Deseche el producto que haya sobrado
tras la aplicación.**