

# CELOX-A Modo de empleo

# 1 – Coga un sobre de CELOX-A.



2 – Rasge el sobre por la marca.



### 3 – Extraiga el aplicador.



## 4 – Retire el tapón de protección del aplicador.



## 5 – Inserte el émbolo en el aplicador.



## 6 – Retire la pieza de protección azul del aplicador.



7 – Inserte el aplicador en la herida lo más posible.





8 — Empuje lentamente el émbolo. Una vez introducido el producto, extraiga el aplicador con cuidado.



9 – Cubra la herida con una venda y presione con firmeza durante 5 minutos.



# 10 – Si el sangrado persiste

## **Si el sangrado continúa:**

- **Útilice un segundo aplicador**
- **Presione durante 5 minutos mas**

# 11 – Fije con una venda para mantener la presión sobre la herida



# 12 – Una vez controlada la hemorragia

**Busque a tención médica**

**Enseñe el embalaje del CELOX al médico**

**Deseche el producto que haya sobrado  
tras la aplicación**